

VÝROBA PROSTHETIKY NA NOS



1. Vyjměte odlitek z formy a usadte jej na podložku.
Pozor! Sádru musí být absolutně suchá,
proto je výhodnější polymerační sádra Acrylic One.

2. Na sádru naneste tenkou vrstvu separátoru
Super Seal a nechte 4 hod. schnout.

3. Aby nebyl rypáček těžký a ušetřili jste silikon
namodelujte na sádru nejprve podklad z modelovací
hmoty Super Sculpey, která později vytvrdne v troubě
a dá se ze silikonového rypáčku snadno odstranit.



4. Odvažte si odpovídající množství Derma-Sil
v poměru 10 : 1.

5. Vyválcujte prohnětaný silikon strojkem
na nudle (není nutné, ale dojde k lepšímu
a snazšímu promísení jednotlivých složek).

6. Pro požadovaný odstín silikonové hmoty
přimíchejte do silikonu pigment Silc-Pig.
(velmi malé množství)



7. Smíchejte pigmenty se silikonem a vyválcujte je
do tenké vrstvy. Silikon získá odpovídající tvrdost
až při vytvrdnutí v troubě. Při modelaci je měkký.

8. Modelujte silikon na sádrový odlitek nosu
s případným výplňovým podkladem
z modelovací hmoty Super Sculpey.

9. Odstraňte případné přesahy Derma-Silu
a vyhladte okraje a přesahy pomocí
silikonového ředidla NOVOCSS Gloss.